

APIVAGINUM

Propolisové vaginální čípky s kyselinou hyaluronovou

Návod k použití

1. Popis produktu
2. Složení
3. Působení
4. Použití
5. Návod na použití
6. Upozornění
7. Skladování
8. Balení
9. Výrobce
10. Distribuce

1. Popis produktu:

Propolisové vaginální čípky s kyselinou hyaluronovou APIVAGINUM jsou zdravotnickým prostředkem. Jsou určeny pro lokální použití ve vagíně.

1 čípek o váze 2,6g obsahuje:

13 mg kyseliny hyaluronové (sodium hyaluronate)

65 mg propolisu (ethanolic extract of propolis)

Čípky jsou zatavené v bublinách v plastové balící folii. Bubliny jsou mezi sebou perforované, tato perforace umožňuje jednoduché oddělení čípku od ostatních. Čípek se vyjme z folie rozdělením a odloupením štítku z folie.

Po vložení se čípek ve vagíně rozpustí a vytvoří viskózně-elastický gel, který má zvlhčující vlastnosti a vytváří aseptickou bariéru.

2. Složení:

Polyethylene glycols, propolis, sodium hyaluronate.

3. Působení:

Čípek se rozpustí ve vagíně a vytvoří viskózní hydrogel, který pokryje sliznici. Kyselina hyaluronová váže vodu z navlhlé sliznice a tím vytváří na povrchu viskózně-elastický povlak. Tento povlak chrání sliznici a vytváří prostředí vhodné pro aktivaci přirozených regeneračních a protizánětlivých mechanismů. Povlak zabraňuje růstu patogenní mikroflóry a vytváří aseptickou bariéru, která podporuje rychlejší léčbu poranění a obnovuje přírodní fyziologické stavy vagíny.

Povlak zabezpečí bariéru, která má následující vlastnosti:

- zvlhčující
- aseptická, chrání před pronikáním mikroorganismů a blokuje růst patogenů
- dává záruku pH, který koresponduje s sekretem vagíny
- podporuje aktivaci přirozených regeneračních mechanismů:
 - Pomnožování a migraci fibroblastů a současně druhotnou syntézu kolagenu a jiných mimobuněčných elementů (kyselina hyaluronová)
 - Zvýšení mitotické aktivity pojivové buněčné tkáně a stupňování regenerace vláknitého pojivového tkaniva (propolis)
- podpora aktivace přirozených protizánětlivých mechanismů

4. Použití:

Produkt je určen pro:

- Zmírnění poranění a úrazů vagíny a vnějších ženských orgánů vyplývajících ze sucha, tření nebo jiných faktorů spojených se sekundární infekcí ženských vnějších orgánů
- Lokální ochranu tkáně a obnovu přirozeného fyziologického stavu vaginální mukózy, zvláště po řezu (nástrihu) hráze v 2. fázi porodu (episiotómie) a kónizaci děložního čípku.
- Zmírnění dyskomfortu vnějších ženských orgánů způsobeného otokem, zarudnutím, svěděním či vyměšováním...

5. Způsob použití

Používá se jeden čípek denně večer před spaním. Doporučuje se vyhnout pohlavnímu styku po aplikování čípku . Aplikujte čípky pravidelně 5 dní, až se dostaví změny patologického poranění. Léčba by měla být naplánovaná tak, aby nebyla přerušena menstruačním cyklem. Vyjměte čípek z balící folie:

- oddělte jednu bublinu s čípkem odtrhnutím perforované části,
- rozdělte dva plastové balící štítky a jemně je roztrhněte,
- vyberte čípek a hned jej vložte do vagíny.

Doporučuje se zavádění čípku v poloze vleže na zádech s jemně zvednutými stehny.

6. Upozornění:

Nepoužívat vaginální čípky v průběhu menstruace.

Nepoužívat v případě alergie na některou složku zdravotnického prostředku.

Těhotné a kojící pacientky by měly používat vaginální čípky pouze tehdy, pokud to nařídí lékař.

Pokud se po aplikaci produktu zhoršily poranění, ekzémy, nebo se vyskytly poruchy v oblasti vnějších ženských orgánů, které před aplikací nebyly viditelné, přerušete používání produktu a kontaktujte svého lékaře.

Jestliže po používání produktu nastane zlepšení, nebo ustoupení poranění, a po krátké době se problém objeví znova, v léčbě by se nemělo pokračovat a pacientka by měla kontaktovat svého lékaře. Ten určí adekvátní léčbu.

Nepoužívat současně s jinými vaginálními přípravky.

Nepoužívat po uplynutí data spotřeby uvedeného na obalu.

Skladovat mimo dosahu dětí.

7. Skladování:

Skladovat v pokojové teplotě, 15-25 °C. Chraňte před teplem – nevystavujte slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla.

8. Balení:

Balení obsahuje 5 vaginálních čípků.

9. Výrobce:

VITAPRODUKT, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, SK

10. Distribuce v ČR:

Ing. Sikora Jiří - Atiss, Ostravská 480, 735 14 Orlová 3,
atiss.sikora@gmail.com, www.atiss.cz

Datum vydání návodu: 2008-02-22

CE